

**ECLIPSE**<sup>®</sup>  
SISTEMA DI RESINA PER PROTESI

IL TEMPO È DENARO. ECLIPSE.



**DENTSPLY**

# ECLIPSE®

## Semplificate la costruzione delle protesi totali: usate Eclipse

Il Sistema di Resina Protesica Eclipse è un nuovo metodo rivoluzionario per la realizzazione di protesi totali. Con Eclipse la costruzione risulta estremamente semplificata, perché la tecnica della cera persa diventa superflua e non sono più necessarie modellazione, messa in muffola ed eliminazione della cera.

Invece di utilizzare la cera, le protesi vengono costruite direttamente con tre strati di resine Eclipse (Base Plate, Set-up e Contour).

Dopo l'esito positivo della fase di prova le protesi vengono direttamente polimerizzate. La precisione al momento della prova è identica alla precisione del manufatto finale.


Tutte e tre le Resine Eclipse sono prive di MMA e si lavorano come la cera.

Le resine polimerizzate presentano un'estetica eccellente e buone proprietà meccaniche.



## ... Il Sistema di Resina per Protesi comprende:

- Resine e accessori
  - resina Base Plate per la fabbricazione della base protesica definitiva
  - resina Set-up per il montaggio dei denti protesici
  - resina Contour per il contorno della protesi
- Unità fotopolimerizzatrice VLC
  - per la polimerizzazione dei materiali
- Forno di condizionamento
  - per il preriscaldamento dei modelli/materiali
- Scaldacera
  - per la preparazione della resina Contour
- Spatola elettrica
  - per l'applicazione della resina Set-up e Contour
- Phon ad aria calda
  - da utilizzare al posto della fiamma

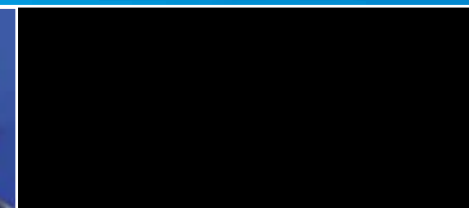

# ECLIPSE®

## Eclipse: una rivoluzione nella tecnologia delle resine per protesi

La resina Eclipse è composta da oligomeri di uretano, una classe di materiali ampiamente diffusa e approvata per diverse applicazioni in campo dentale e priva di monomeri di metile, etile, propile o butile. La formulazione unica delle resine Eclipse è superiore alle proprietà fisiche e meccaniche dei vecchi materiali uretanici.

### Indicazioni dell'Eclipse



Eclipse è completamente riparabile e ribasabile.

Tutte le resine sono disponibili in tre colorazioni note del Lucitone (Original, Light Pink, Light Reddish Pink) oltre al Clear.

# ... e il successo è vostro

## Accrescere i profitti



- eliminando le fasi di modellazione, messa in muffola ed eliminazione della cera
- riducendo i tempi di rifinitura, in quanto non ci sono impernature, eccessi di resina o rivestimento residuo
- grazie alla potenziale riduzione dei rifacimenti, dato che i problemi di precisione possono essere individuati e risolti già all'inizio del trattamento

## Migliorare la qualità



- garantendo protesi prive di MMA per una maggiore biocompatibilità
- garantendo una base protesica definitiva polimerizzata che offre una precisione al momento della prova identica a quella del manufatto finale

## Migliorare il servizio



- offrendo un prodotto innovativo
- riducendo le correzioni alla poltrona dopo che la protesi è stata inserita nel cavo orale
- garantendo lavori di ottima qualità

# ECLIPSE®

## Come lavorare con Eclipse:


Nonostante Eclipse sia un nuovo metodo rivoluzionario per la realizzazione di protesi totali, le fasi di fabbricazione sono molto simili alla tecnica convenzionale. Con Eclipse avrete semplicemente meno lavoro e più profitti. Le resine Base Plate, Set-up e Contour sono prive di MMA e si lavorano come la cera.

1. Modellare la resina della base protesica definitiva Eclipse sul modello Master.
2. Dopo l'appuntamento per il controllo dell'occlusione montare i denti direttamente sulla base protesica definitiva polimerizzata utilizzando la resina Set-up e la spatola elettrica.
3. Applicare uno strato di resina Contour e completare la protesi per la prova.
4. Dopo la prova polimerizzare il montaggio completo nell'unità fotopolimerizzatrice VLC Eclipse.
5. Protesi ultimata dopo la polimerizzazione finale.

Protesi totale Eclipse



Protesi totale convenzionale

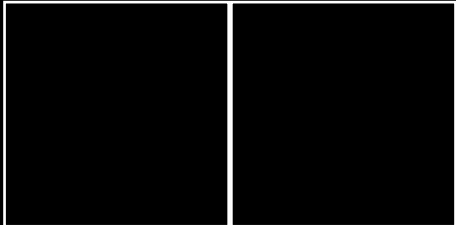

PIETRO SIMONINI (Studio Tre – S. Giovanni in Persiceto – Bologna – ITALIA)

Noi utilizziamo il sistema Eclipse nel nostro laboratorio per la sua grande versatilità. Con queste resine noi costruiamo protesi totali e parziali, protesi pre-estrattive, provvisorie e bite notturni. Questo sistema ha moltissimi pregi, ma i principali sono la precisione e la riduzione dei tempi di lavoro che sono particolarmente apprezzabili.

Pietro Simonini

MARINO COCCO (Laboratorio Cocco – Torino – ITALIA)

Nel mio laboratorio utilizzo il sistema Eclipse per la sua precisione, praticità e affidabilità. Questo sistema si pone nel laboratorio e nello studio odontoiatrico come tecnica sostitutiva che migliora la qualità delle nostre protesi.

Marino Cocco



## Il tempo è denaro. Eclipse.

Eclipse è la vostra opportunità ideale di maggior guadagno. Invece di investire il tempo per la modellazione, messa in muffola ed eliminazione della cera, ora potete concentrarvi su altri lavori che rendono di più. Semplificate la costruzione delle protesi totali: usate Eclipse.



Importatore esclusivo per l'Italia:

Produttore:

Rappresentante CEE:

**NOBIL-METAL** s.p.a.

**Nobil-Metal® S.p.A.**

Strada San Rocco, 28-32-34

14018 Villafranca d'Asti (AT), Italia

Tel. +39.0141.933811 · Fax +39.0141.943840

e-mail: info@nobilmetal.it · Internet: www.nobilmetal.it

**DENTSPLY Intern. Inc.**

York, PA 17405 – 0872 U.S.A.

**DeguDent GmbH**

Postfach 13 64 · 63403 Hanau

GERMANY

www.dentsply-degudent.de

**DENTSPLY**