

ECOX

DECAPANTE IN POLVERE PER LEGHE DENTALI PREZIOSE E SEMIPREZIOSE

ECOX è un sale decapante in polvere da sciogliere in acqua. La soluzione acida, (Ecox + acqua) permette di disossidare e pulire leghe dentali preziose e semipreziose in modo semplice e veloce.

ECOX può anche essere usato come additivo nel sistema ECOCLEAN (vedere apposite istruzioni)

ISTRUZIONI D'USO **per l'utilizzo del prodotto ECOX con** **leghe auree, palladiate e argento-palladio**

1. Diluire 50 grammi di polvere ECOX in 200 ml di acqua agitando con una bacchetta di vetro o ceramica (Si consiglia un recipiente in ceramica oppure vetro. Attenzione: non utilizzare contenitori in metallo).
2. Riscaldare la soluzione a 60°C
3. Immergere i manufatti da pulire nella soluzione. **NON USARE** pinzette metalliche!
4. Dopo 5 minuti togliere i pezzi dal contenitore e lavare sotto acqua corrente. Asciugare e verificare il grado di pulizia raggiunto e passare alle lavorazioni successive.
5. Avere cura di chiudere con cura il recipiente. La soluzione può essere utilizzata più volte. Quando la soluzione raggiunge un colore scuro o diventa densa, deve essere sostituita.
6. In ogni caso, dopo 40-50 minuti di utilizzo la soluzione deve essere rinnovata onde evitare risultati non soddisfacenti.
7. Lo smaltimento della soluzione deve avvenire in conformità alle normative locali vigenti. L'acidità residua della soluzione può essere neutralizzata con il preparato NEUTROX Nobil Metal (10 grammi Neutrox ogni 100 ml di soluzione). L'avvenuta neutralizzazione sarà indicata dalla colorazione gialla assunta dalla miscela Ecox-Neutrox. In taluni casi, al fine di ottenere la colorazione gialla, cioè la neutralizzazione, potrebbe essere necessario aumentare il dosaggio.

ATTENZIONE: Leggere la scheda di sicurezza

Contiene Acido Sulfammico : Irritante per occhi e pelle – Può provocare ustioni. Tenere il contenitore ermeticamente chiuso, in luogo ben asciutto e lontano dalla portata dei bambini. Non manomettere il contenitore.

Smaltimento: Si consiglia sempre di neutralizzare l'acido con prodotti idonei (es.: NEUTROX Nobil-Metal).



corrosivo



irritante

NOBIL-METAL[®]
DENTAL ALLOYS & SOLDERS

Istruzioni d'uso ECOX rev.00 – 23.09.08

Strada San Rocco, 28 - 14018 Villafranca d'Asti - AT - Italia - Tél. +39.0141.933811 –

Fax +39.0141.943.840 - e-mail : info@nobilmetal.it